

Heizzeiten und Codes für / Heating times and codes for: **BIOPLAST® XTREME und BIOPLAST® XTREME PRO**

Gerätetyp / machine	Materialtyp / Material	
	BIOPLAST® XTREME 5 mm	BIOPLAST® XTREME PRO 4 mm
TWINSTAR® P / V 	Heizzeit / Heating: 140 sec Code 277 Kühlzeit / Cooling: 300 sec	Heizzeit / Heating: 100 sec. Code 247 Kühlzeit / Cooling: 300 sec.
MINISTAR® 		
BIOSTAR® IV 		
MINISTAR S® 	Heizen / Heating 100 sec. Code 247 Kühlzeit / Cooling: 300 sec.	Heizzeit / Heating: 80 sec. Code 227 Kühlzeit / Cooling: 300 sec.
BIOSTAR® V – VI / scan 		

Die tabellarisch aufgeführten Ergebnisse gelten für alle Farbvarianten der Folientypen BIOPLAST® XTREME und BIOPLAST® XTREME PRO.

The heating times and codes given in the table above are valid for all colour variants of BIOPLAST® XTREME and BIOPLAST® XTREME PRO.