

# CA<sup>®</sup> Retentionsfolie pd

## Verarbeitungshinweise

### Eigenschaften und Anwendung:

Die CA<sup>®</sup> Retentionsfolie pd ist ein hochwertiges Tiefziehmaterial aus Copolyester, einem extrem bruch- und abrasionsfesten, glasklaren Kunststoff, indiziert für die Herstellung einer Langzeit-Retainer-Schiene im Anschluss an die CA<sup>®</sup> Therapie (CA<sup>®</sup> Folie extra soft, CA<sup>®</sup> Folie soft, CA<sup>®</sup> Folie medium und CA<sup>®</sup> Folie hard). Das Material, aus dem die CA<sup>®</sup> Retentionsfolie pd besteht wurde nach den internationalen Normen ISO 10993 sowie DIN EN ISO 7405 zellbiologisch geprüft und für klinische Zwecke freigegeben.



### Ausarbeiten:

Zur Ausarbeitung der CA<sup>®</sup> Retentionsfolie pd empfehlen wir das Finier-Set (REF 3378) und für die Endbearbeitung die DIMO<sup>®</sup> PRO Scheiben (REF 3381).

### Hinweis:

Aufbau mit Acrylat ist nicht empfehlenswert, da es zu einer Versprödung und Brüchen führt.

### Pflege:

Zur schonenden Pflege und Reinigung der CA<sup>®</sup> Retentionsfolie pd eignet sich ideal unser CETRON<sup>®</sup> Pflegepulver (REF 3237), ohne die Werkstoffeigenschaften zu beeinflussen, zusammen mit dem CETRON<sup>®</sup> Pflegeset (REF 3236).

CA <sup>®</sup> Retentionsfolie pd		10 St.
<b>Bezeichnung</b>	<b>Stärke</b>	<b>125 mm</b> ○
CA <sup>®</sup> Retentionsfolie pd	0,75 mm	REF 3438
CA <sup>®</sup> Retentionsfolie pd	1,0 mm	REF 3440

### Weitere Produkte aus dem CA<sup>®</sup> Lieferprogramm:

CA <sup>®</sup> Folie		10/100 St.
<b>Bezeichnung</b>	<b>Stärke</b>	<b>125 mm</b> ○
CA <sup>®</sup> Folie extra soft	0,4 mm	REF 3441
CA <sup>®</sup> Folie soft	0,5 mm	REF 3405
CA <sup>®</sup> Folie medium	0,625 mm	REF 3406
CA <sup>®</sup> Folie hard	0,75 mm	REF 3407

CA <sup>®</sup> Folie A2 pd		10 St.
<b>Bezeichnung</b>	<b>Stärke</b>	<b>125 mm</b> ○
CA <sup>®</sup> Folie A2 soft pd	0,5 mm	REF 3453
CA <sup>®</sup> Folie A2 medium pd	0,625 mm	REF 3454
CA <sup>®</sup> Folie A2 hard pd	0,75 mm	REF 3455

