


Zur Herstellung von Intraoralen Schnarch-Therapie-Geräten bzw. Kl. II Kfo-Geräten auf tiefgezogenen Schienen.

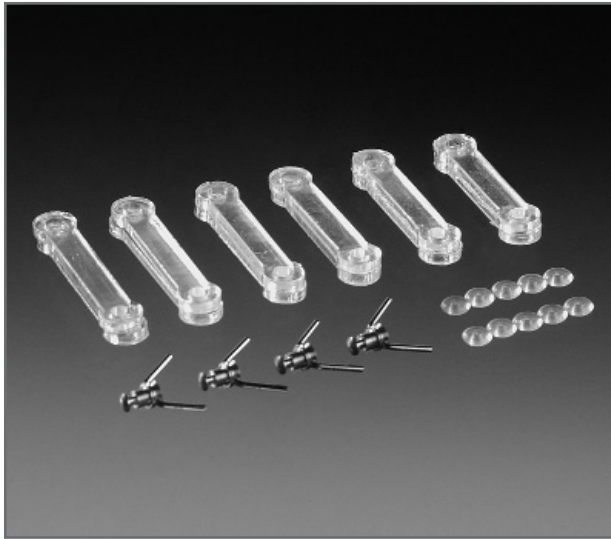

Herstell-Kit bestehend aus:

- 4 Befestigungsteile mit O-Ringen
- 6 Paar Kunststoffstege (25-30 mm Länge)

- ① Gipsmodelle gemäß Konstruktionsbiss ein-artikulieren; für Schnarch-Schienen empfiehlt sich eine 60% Protrusion vom ermittelten individuellen Maximalwert.
- ② Plangetrimmte Modelle mit ISOFOLAN®-Folie überziehen und beschneiden.
- ③ Anschließend Modelle einbetten und DURAN® 2,0 mm gemäß Vorgaben tiefziehen und lediglich grob ausarbeiten.
- ④ Schienen reponieren und Befestigungsteile mit der OPM-Positionierhilfe (0°, REF 5496) einschmelzen. Anschließend einpolymerisieren und okklusale Aufbisse aus DURASPLINT® anfertigen.
- ⑤ Abschließend Schienen und Aufbisse endbearbeiten, polieren und auf Passung und Okklusion überprüfen.
- ⑥ Die erforderliche Protrusion kann wahlweise durch Austausch der Stege in 1 mm Schritten verändert werden.
- ⑦ Die Befestigung der Stege erfolgt mit Hilfe der O-Ringe.

