


Trockenschrank

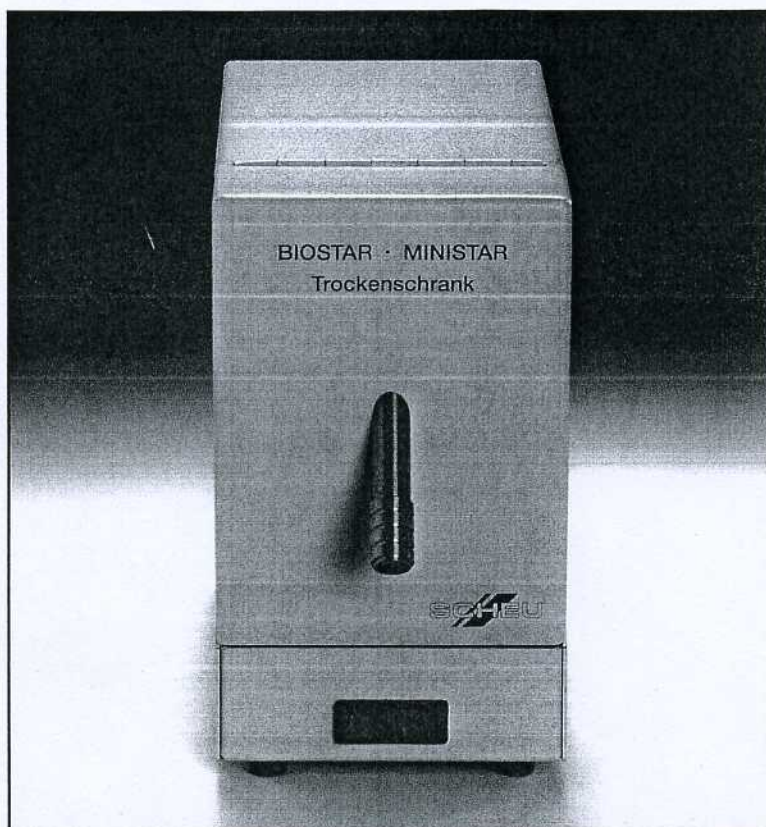


Viele Kunststoffe reagieren hygroskopisch, d.h. sie nehmen Luftfeuchtigkeit auf. Dies ist beim Tiefziehverfahren eine unangenehme Eigenschaft, die insbesondere bei hochwertigen Materialien wie DURASOFT® und IMPRELON® "S" während des Temperierens unter dem Infrarot-Strahler zur Bläschenbildung führt.

Um diese Materialschädigung zu vermeiden, ist es notwendig, solche hochwertigen Materialien vorzutrocknen.


Der wartungsfreie BIOSTAR® / MINISTAR®-Trockenschrank ist darauf abgestimmt.

Die Zuverlässigkeit garantieren wir Ihnen.

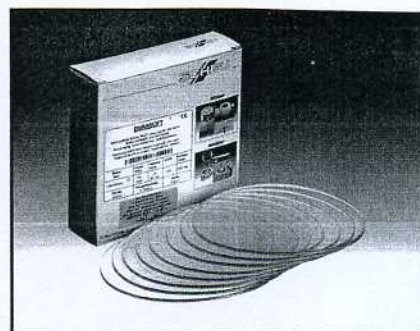

DURASOFT®

IMRELON® "S"

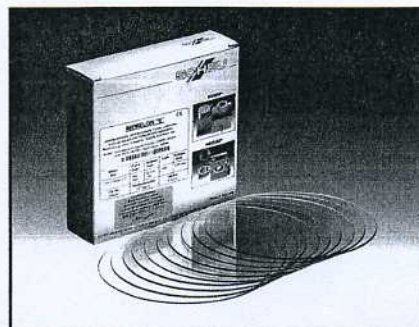

Das Vortrocknen kann nunmehr vorzugsweise mit dem Trockenschrank rationell und energiesparend (60 W) durchgeführt werden.

Bis zu 17 Tiefziehplatten können bei einer konstanten Temperatur von ca. 80°C gleichzeitig vorgetrocknet werden.

Beachten Sie hierzu bitte die näheren Informationen auf den Beipackzetteln.

Technische Daten:

Spannung: 230 V

Leistung: 60 W

Maße: 24 x 20 x 11 cm

Gewicht: 3,5 kg

SCHEU