



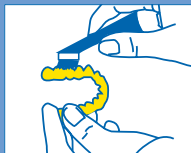

## Anwendung

- 1 Inhalt eines Beutels mit ca. 150 ml Wasser mischen, Reinigungsobjekt unter fließendem Wasser abspülen und einlegen.
- 2 Ca. 30 min. einwirken lassen. Lösung kann 3 bis 4 Tage verwendet werden.
- 3 Gelöste Beläge mit Bürste entfernen und Objekt erneut abspülen.
- 4 Vor dem Einsetzen kann das Reinigungsobjekt zusätzlich mit CETRON® Spray gepflegt und erfrischt werden. Für einen noch zitronigeren Geschmack!

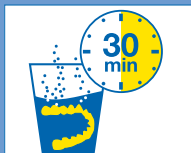

# cetron®



## Pflege- und Reinigungsprodukt

für Zahnsparren, Schienen, Zahnersatz und Mundschutz

Überreicht von:

[www.scheu-dental.com](http://www.scheu-dental.com)

**SCHEU**

DE 5.000/05/17 G REF PM0011.01



**SCHEU**  
Dental Technology



# ce**t**ron®

## Die richtige Pflege

Der Kontakt mit Lebensmitteln, Getränken, Medikamenten sowie das individuelle Mundmilieu führen bei Schienen, Spangen und Prothesen im Laufe der Tragezeit zu Ablagerungen, Verfärbungen oder Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen.

Mit CETRON® erhalten Sie ein optimales Reinigungsmittel, das im Handumdrehen dauerhaft reinigt und pflegt.

Es können alle prothetischen und kieferorthopädischen Apparaturen gereinigt, von Ablagerungen befreit und aufgefrischt werden.



Das Pflegespray – zur Anwendung direkt vor dem Einsetzen der Schiene, Spange, etc.



Praktische 15g-Portionsbeutel für den Patientengebrauch. Der Inhalt wird in der passenden Reinigungsdose aufgelöst.