


**Erhältlich in  
der Apotheke!**

# cetron®

## Pflege- und Reinigungsprodukte für Zahnsparren, Schienen, Zahnersatz und Mundschutz

Der Kontakt mit Lebensmitteln, Getränken, Medikamenten sowie das individuelle Mundmilieu führen bei Schienen, Spangen und Prothesen im Laufe der Tragezeit zu Ablagerungen, Verfärbungen oder Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen.

Mit CETRON® erhalten Sie bzw. Ihre Patienten ein optimales Reinigungsmittel, das im Handumdrehen dauerhaft reinigt und pflegt. Die preiswerte Lösung sorgt für langen Tragekomfort und hohe Patienten-Compliance. Es können alle prothetischen und kieferorthopädischen Arbeiten gereinigt, von Ablagerungen befreit und aufgefrischt werden.

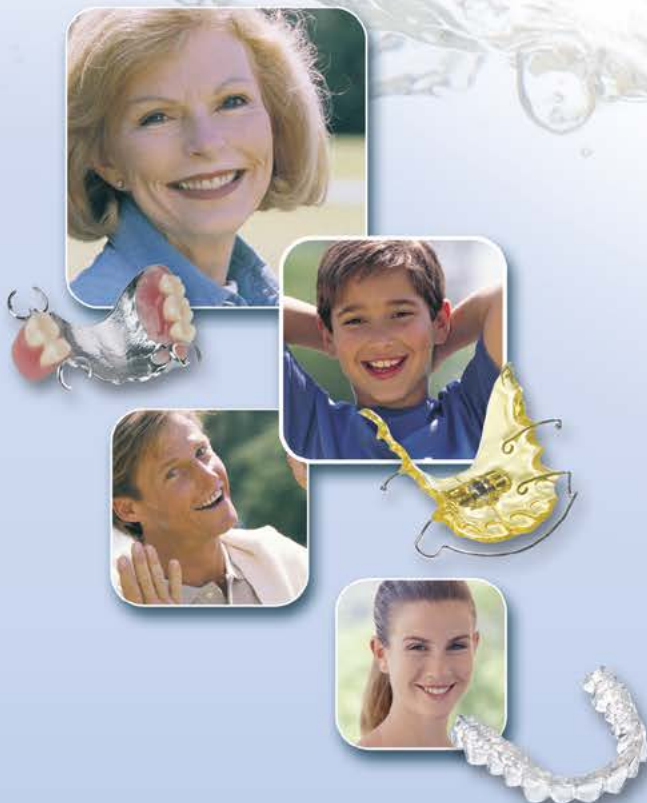

Praktische 15g-Portionsbeutel für den Patientengebrauch. Der Inhalt wird in der passenden Reinigungsdose aufgelöst.



Das Pflegespray – zur Anwendung direkt vor dem Einsetzen der Schiene, Spange, etc.

SCHEU-DENTAL GmbH  
www.scheu-dental.com

phone +49 23 74 92 88-0  
fax +49 23 74 92 88-90



1. Inhalt eines Beutels mit ca. 150 ml Wasser mischen.
2. Ca. 30 min. einwirken lassen und mit klarem Wasser abspülen.
3. Gelöste Beläge können mit Bürste und Zahnpasta gereinigt werden.
4. Vor dem Einsetzen pflegt und erfrischt das Spray.

cetron®	REF	Inhalt
Pflegeset	3236.1	1 Reinigungsdose und 5 Portionsbeutel (15 g)
Nachfüllpackung	3237.1	5 Portionsbeutel (15 g)
Nachfüllpackung	3237.2	25 Portionsbeutel (15 g)
Nachfüllpackung	3237.3	250 Portionsbeutel (15 g)
Pflegespray	3238.1	1 Pflegespray (75 ml)

Am Burgberg 20  
58642 Iserlohn · Germany

**SCHEU**  
Dental Technology