



BIOSTAR®



MINISTAR S®



Perfektionist

unendliche Möglichkeiten zu bieten.

**Übersichts- und Indikationstabelle
zu Tiefziehenanwendungen**



| Indikationsbereich (alphabetisch) | Produkt | empfohlene Stärke |
|--|---------------------------------|------------------------|
| Ätzmaske | COPYPLAST® | 1,0 mm |
| Aufbisssschiene / Knirscherschiene / Miniplast-Schiene | DURAN® | 1,0 – 1,5 mm |
| | DURAN® + | 1,0 – 1,5 mm |
| | DURASOFT® pd mit DURASOFT® seal | 1,8 mm |
| Bissnahme, Bissregistrater | IMPRELON® weiß, klar | 2,0 / 3,0 mm |
| Bleichschiene | BIOPLAST® bleach | 1,0 mm |
| | COPYPLAST® | 1,0 mm |
| Bracket-Transfermaske | COPYPLAST® | 0,5 / 0,75 mm |
| Dublierformen für Situationsmodelle | BIOPLAST® (Gips) | mind. 3,0 mm |
| | COPYPLAST® (Kunststoff) | 2,0 mm |
| Fluoridierungsschiene | DURAN® | 1,0 / 1,5 mm |
| | DURAN®+ | 1,0 / 1,5 mm |
| Gießmasken für provisorische Kronen und Brücken | COPYPLAST® | 0,5 – 2,0 mm |
| Gusskäppchen | HARDCAST® | 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |
| | COPYPLAST® | 0,5 / 0,75 mm |
| Immediatprothese / Interimsprothesen | BIOCRYL® C (rosa / klar) | 2,0 / 3,0 mm |
| Implantatschiene (Röntgen / Bohrschablone) | DURAN® | 2,0 / 3,0 mm |
| | DURAN®+ | 2,0 mm |
| Individuelle Löffel, Abdrucklöffel, Funktionslöffel | IMPRELON® (klar) | 2,0 / 3,0 mm |
| | IMPRELON® (natur) | 3,0 mm |
| Invisible Retainer / KFO-Korrekturschiene | DURASOFT® pd mit DURASOFT® seal | 1,2 mm |
| | DURAN® | 0,4 – 1,0 mm |
| | DURAN®+ | 0,4 – 1,0 mm |
| | IMPRELON®S pd | 0,5 – 1,0 mm |
| | COPYPLAST® C | 1,0 mm |
| Isolierfolie / Unterziehfolie | ISOFOLAN® | 0,1 mm |
| Kosmetische Schiene | DURAN®+ A2 | 0,5 – 0,75 mm |
| | DURAN®+ white pd | 0,5 – 0,75 mm |
| Modellschutz / Schutzüberzug / Skin-Verpackung | Kaschierfolie | 0,15 mm |
| OSAMU-Retainer® (Kombination aus BIOPLAST® und IMPRELON®S pd) | BIOPLAST® | 1,5 mm |
| | IMPRELON®S pd mit OSAMU-Bond | 0,75 mm |
| Platzhalterfolie | ISOFOLAN® | 0,1 mm |
| | Platzhalterfolie | 0,1 mm |
| Platzhalter für Bleichschiene | HARDCAST® | 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |
| Positioner | BIOPLAST® | 3,0 – 5,0 mm |
| Retentionsschiene / Langzeitretainer | COPYPLAST® C | 1,0 mm |
| | DURAN® / DURAN®+ | 0,75 / 1,0 mm |
| | IMPRELON®S pd | 0,75 / 1,0 mm |
| Retainer / KFO-Dehnplatten | BIOCRYL® M | 2,0 mm |
| | BIOCRYL® C | 2,0 mm / für UK 3,0 mm |
| Schienen-Provisorien / Stripkrone für prov. Kronen und Brücken | DURAN® | 0,5 mm – 1,0 mm |
| | DURAN® +A2 pd | 0,5 – 0,75 mm |
| Schnarchtherapieschiene | DURAN® | 2,0 mm |
| | DURAN®+ | 2,0 mm |
| | DURASOFT® pd mit DURASOFT® seal | 1,8 / 2,5 mm |
| Sport-Mundschutz | BIOPLAST® | 1,0 – 5,0 mm |
| | BIOPLAST® XTREME / XTREME PRO | 4,0 / 5,0 mm |
| Therapieplanungsfolie / Bruxismus-Analyse | BRUX CHECKER® | 0,1 mm |
| Verbandplatte | DURAN® | 1,0 mm |
| | DURAN®+ | 1,0 mm |

| Materialeigenschaft | Verbund mit Acrylat | empfohlenes Acrylat | empfohlene Isolierung / Sonstiges |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| zähelastisch | nein | | Modell kurz wässern |
| hartelastisch | ja | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® Folie |
| hartelastisch | ja | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | |
| hart / weiche Folie | ja | DURASPLINT® | ISOFOLAN® Folie |
| fest, nicht elastisch | ja | DURASPLINT® | ISOFOLAN® Folie |
| weichelastisch | nein | | BIOPLAST® Isoliermittel od. kurz wässern |
| zähelastisch | nein | | Modell kurz wässern |
| zähelastisch | nein | | Modell kurz wässern |
| weichelastisch | nein | | BIOPLAST® Isoliermittel od. kurz wässern |
| zähelastisch | nein | | Modell kurz wässern |
| hartelastisch | ja | | BIOPLAST® als Platzhalter / Reservoir |
| hartelastisch | ja | | BIOPLAST® als Platzhalter / Reservoir |
| zähelastisch | nein | | Modell kurz wässern |
| zähelastisch | nein | | Platzhalterfolie |
| zähelastisch | nein | | Modell kurz wässern |
| schlagzäh | ja | BIOCRYL® RESIN | ISOFOLAN® Folie |
| hartelastisch | ja | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® Folie |
| hartelastisch | ja | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | |
| fest, nicht elastisch | ja | DURASPLINT® | ISOFOLAN® Folie / Schaumstoffscheiben |
| fest, nicht elastisch | ja | DURASPLINT® | ISOFOLAN® Folie / Schaumstoffscheiben |
| hart / weiche Folie | ja | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® Folie |
| hartelastisch | ja | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® Folie |
| hartelastisch | ja | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | |
| hartelastisch / schlagzäh | nicht empfohlen | | ISOFOLAN® Folie |
| zähelastisch | nein | | Modell kurz wässern |
| zähelastische Isolierfolie | nein | | |
| hartelastisch | ja | K+B Material | |
| hartelastisch | ja | K+B Material | |
| Verbindet sich mit Skin-Karton | | | |
| weichelastisch | nein | | BIOPLAST® Isoliermittel |
| hartelastisch / schlagzäh | nein | | |
| zähelastische Isolierfolie | nein | | |
| harte Isolierfolie | ja | | |
| zähelastisch | nein | | Platzhalterfolie |
| weichelastisch | nein | | BIOPLAST® Isoliermittel |
| zähelastisch | nein | | Modell kurz wässern |
| hartelastisch | ja | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® Folie |
| hartelastisch / schlagzäh | nicht empfohlen | | ISOFOLAN® Folie |
| schlagzäh / hartelastisch | ja | BIOCRYL® RESIN | ISOFOLAN® Folie |
| schlagzäh | ja | BIOCRYL® RESIN | ISOFOLAN® Folie |
| hartelastisch | ja | K+B Material | ISOFOLAN® Folie |
| hartelastisch | ja | K+B Material | |
| hartelastisch | ja | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® Folie |
| hartelastisch | ja | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | |
| hart / weiche Folie | ja | DURASPLINT® | ISOFOLAN® Folie |
| weichelastisch | nein | | BIOPLAST® Isoliermittel |
| weichelastisch | nein | | BIOPLAST® Isoliermittel |
| hartelastisch | ja | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® Folie |
| hartelastisch | ja | DURASPLINT® / DURASPLINT® LC | |

MINISTAR

MINISTAR 1992-2003



MINISTAR S ab 2003



MINISTAR S ab 2017



BIOSTAR

BIOSTAR I 1967-1976



BIOSTAR II 1976-1988



BIOSTAR III 1988-1999



BIOSTAR IV 1999-2006



BIOSTAR V 2006-2009



BIOSTAR VI 2009-2015



BIOSTAR VII ab 2015



Mehr Informationen erhalten Sie unter:

SCHEU-DENTAL GMBH
www.scheu-dental.com

phone +49 2374 9288-0
fax +49 2374 9288-90

Am Burgberg 20
58642 Iserlohn · Deutschland


Dental Technology

