

# BIOPLAST® Isoliermittel

## Verarbeitungshinweise

### Beschreibung:

BIOPLAST® Isoliermittel ist ein flüssiges Isoliermittel, das bei der Verarbeitung von BIOPLAST® auf Gipsmodellen zum Einsatz kommt. BIOPLAST® Isoliermittel glättet die Modelloberfläche und sorgt für eine glatte, poren- und gipsfreie Innenfläche von Schienen aus BIOPLAST®.

### Verwendungszweck:

Isolierung für Schienen aus BIOPLAST®

### Anwendung:

BIOPLAST® Isoliermittel wird dünn-schichtig auf das Modell aufgebracht. Anschließend wird die Folie auf dem noch feuchten Modell tiefgezogen. Dabei ist darauf zu achten, dass sich kein Isoliermittel in den Vertiefungen ansammelt, da dies zu Blasenbildung in der Folie und somit zu einer Verringerung der Abformgenauigkeit führen kann. Das Modell ist nach dem Tiefziehvorgang nicht mehr zur weiteren Verwendung geeignet.

Ausführliche Informationen zu den jeweiligen Anwendungen sind auf unserer Homepage [www.scheu-dental.com/downloads](http://www.scheu-dental.com/downloads) zu finden.

### Lieferformen:

BIOPLAST® Isoliermittel	
100 ml, Applikatorflasche inkl. 3 Aufsätze	REF 3166
500 ml	REF 3189