


# CLEAR-BLOKKER®

## Verarbeitungshinweise

- Beschreibung:** CLEAR-BLOKKER® ist ein lichthärtendes Aufbaumaterial für die Zahnmedizin, Kieferorthopädie und zahnärztliche Schlafmedizin.
- Indikation:** CLEAR-BLOKKER® ist ein Ergänzungsprodukt zum DURASPLINT® LC. Es ist für die Modellierung von Eckzahnführungen und den Aufbau von Kontaktpunkten für Aufbisschienen, die aus DURAN® 1,5 mm und DURASPLINT® LC hergestellt wurden, vorgesehen. Außerdem kann es für Reparaturen von Sprüngen und Brüchen von Schienenaufbauten aus DURASPLINT® LC sowie für die Herstellung von Bracket-Transfer-Matrices in der Lingualtechnik verwendet werden. Auch die Herstellung von IST® Schienen mit DURASPLINT® LC und CLEAR-BLOKKER® ist möglich.
- Kontraindikation:** Die intraorale Applikation, z.B. zum Herstellen von Attachments oder Füllungen, die Herstellung von frontalen Biss erhöhungen („Jig“) sowie der Aufbau von Schienen, die nicht aus DURAN® mit einer Mindeststärke von 1,5 mm und DURASPLINT® LC hergestellt wurden, ist kontraindiziert, da das Material für diese Anwendungen nicht geeignet ist. Bei Fehlanwendungen besteht ein erhöhtes Aspirationsrisiko für den Patienten.
- Unverträglichkeiten:** Bei sensibilisierten Patienten können Allergien gegen einzelne Bestandteile des Materials auftreten. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt unter [www.scheu-dental.com/service](http://www.scheu-dental.com/service).
- Anwenden/Aushärten:** Die Oberfläche des zu bearbeitenden Bereichs auf dem DURASPLINT® LC Auftrag anrauen, reinigen und mit LC-Primer benetzen. Den aufgetragenen Primer für 5 Minuten im LC-6 Light Oven lichthärten. CLEAR-BLOKKER® in einer Schichtstärke von 1-2 mm direkt aus der Dosierspritze mittels einer Kanüle auftragen. Anschließend für 10 Minuten lichthärten. Der gehärtete Kunststoff kann mit einer Fräse final bearbeitet und anschließend poliert werden. Zur Polymerisation werden eine UV-LED-Lampe mit einer Wellenlänge von 360-420 nm oder der LC-6 Light Oven benötigt.
- Tip:** CLEAR-BLOKKER® kann auch zum Auffüllen kleinerer Luftbläschen in zuvor aufgebohrten oder gefrästen DURASPLINT® LC Aufbauten verwendet werden.
- Gefahrenhinweise:** Bitte beachten Sie die personenbezogenen Vorsichtsmaßnahmen zur Schutzausrüstung und zur sicheren Handhabung des entsprechenden Sicherheitsdatenblattes unter [www.scheu-dental.com/service](http://www.scheu-dental.com/service).

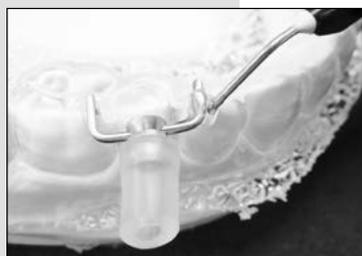

**Hinweis:** Nur für die oben genannte Indikation und durch qualifiziertes Fachpersonal zu verwenden. Zur Einmalverwendung. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes sind unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden!

### Lieferprogramm:

CLEAR-BLOKKER®		
CLEAR-BLOKKER®	1 Stück	REF 5261
4 × 1,5 g, inkl. 10 Kanülen		
Kanülen (Ø 0,4 mm)	5 Stück	REF 5277
Kanülen (Ø 0,9 mm)	5 Stück	REF 5278
DURASPLINT® LC, 3er-Riegel, insg. ca. 40 g	1 Stück	REF 3261
LC-Primer, 10 ml, mit Pinsel	1 Stück	REF 3263
LC-6 Light Oven 230 V	1 Stück	REF 5610
LC-6 Light Oven 115 V	1 Stück	REF 5620

