

Pflege- und Reinigungsprodukte

für Zahnspangen, Schienen, Zahnersatz und Sportmundschutz



Der Kontakt mit Lebensmitteln, Getränken, Medikamenten sowie das individuelle Mundmilieu führen bei Schienen, kieferorthopädischen Apparaturen, Prothesen und Sportmundschutz im Laufe der Tragezeit zu Ablagerungen, Verfärbungen oder Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen. Mit CETRON® Reinigungspulver erhalten Sie bzw. Ihre Patienten ein wirksames Reinigungsmittel, während CETRON® Pflegespray mit seinem angenehmen Zitronenaroma für langanhaltende Frische sorgt und Ihre Schienen, Spangen und Prothesen pflegt. Die preiswerte Lösung sorgt für langen Tragekomfort und hohe Patienten-Compliance. Es können alle prothetischen und kieferorthopädischen Arbeiten sowie Sportmundschutz gereinigt, von Ablagerungen befreit und aufgefrischt werden. Ausgenommen sind hiervon prothetische Arbeiten aus Polyamid wie z.B. Valplast oder Breflex.

Lieferprogramm

// CETRON® Pflegeset	1 Reinigungsdose und 5 Portionsbeutel (15 g)	3236.1
// Nachfüllpackung	5 Portionsbeutel (15 g)	3237.1
// Nachfüllpackung	25 Portionsbeutel (15 g)	3237.2
// Nachfüllpackung	250 Portionsbeutel (15 g)	3237.3
// CETRON® Pflegespray	75 ml	3238.1



Inhalt eines Beutels mit
ca. 150 ml Wasser mischen.



Ca. 30 min. einwirken lassen und mit
klarem Wasser abspülen.



Gelöste Beläge können mit Bürste
und Zahnpasta gereinigt werden.



Vor dem Einsetzen pflegt
und erfrischt das Spray.