

# BIOPLAST® / BIOPLAST® Color / BIOPLAST® Multicolor

## Verarbeitungshinweise

<b>Beschreibung:</b>	BIOPLAST® ist ein weichelastisches, gummiähnliches Tiefziehmaterial aus Ethylvinylacetat (EVA), das sich nicht mit Autopolymerisat verbindet. BIOPLAST® wurde auf seine biologische Unbedenklichkeit geprüft und freigegeben.
<b>Indikation:</b>	Dublirformen für Gips-situationsmodelle, Sportmundschutz, Knirscherschutz, Positioner, OSAMU-Retainer®.
<b>Modellvorbereitung:</b>	Je nach Situation starke Unterschnitte vor dem Tiefziehvorgang mit BLUE-BLOKKER® ausblocken. Zur Isolierung das Gipsmodell einmalig mit BIOPLAST®-Isoliermittel (REF 3189/3166) benetzen und dabei darauf achten, dass sich das Isoliermittel weder in den Vertiefungen ansammelt noch eintrocknet.
<b>Unverträglichkeiten:</b>	Bei bekannter Unverträglichkeit gegen Ethylvinylacetat sollte das Material nicht verwendet werden.
<b>Tiefziehen:</b>	Zahnkränze sollten grundsätzlich auf der Modellstützplatte und Vollmodelle im Granulat tiefgezogen werden. Um ein Anhaften von Granulat und den damit einhergehenden Granulatverlust zu verringern, empfiehlt sich die Verwendung der Granulatabdeckung (REF 3006 groß/REF 3007 klein).
<b>Ausarbeiten:</b>	Die Schiene kann mit der SD-Folienschere A (REF 3460) oder B (REF 3461) auf die finale Länge gekürzt werden. Für die Ausarbeitung haben sich sowohl BIOPERM-Trimmer (REF 3226), DIMO®PRO (REF 3381) und DIMO®PRO SLIM (REF 3376) als auch POLYFIX (REF 3371) bewährt. Für ein optimales Politurergebnis ist der OSAMU-Polierer (REF 3247) bei einer Umdrehungszahl von 5.000 – 10.000 U/Min. ideal.
<b>Reinigung/Pflege:</b>	Zum Reinigen von Schienen aus BIOPLAST® sind unsere CETRON® Reinigungs- und Pflegeprodukte die beste Wahl.
<b>Lagerung:</b>	Vor Sonnenlicht schützen. Trocken aufbewahren.
<b>Sicherheitshinweis:</b>	Nur für die oben genannte Indikation und durch qualifiziertes Fachpersonal zu verwenden. Zur Einmalverwendung. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes sind unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden!

### Lieferprogramm:

BIOPLAST®		125 mm Ø
1,0 mm		REF 3270
1,5 mm		REF 3183
2,0 mm		REF 3185
3,0 mm		REF 3187
4,0 mm		REF 3188
5,0 mm		REF 3374

CE 0044

BIOPLAST® Color		125 mm Ø
3,0 mm	rot	REF 3282
3,0 mm	blau-transparent	REF 3356
3,0 mm	rot-transparent	REF 3355
3,0 mm	weiß	REF 3445
3,0 mm	schwarz	REF 3448
3,0 mm	neonrot	REF 3352
3,0 mm	neongrün	REF 3353
3,0 mm	azurblau	REF 3354
3,0 mm	Color-Set	REF 3271

CE

BIOPLAST® Multicolor		125 mm Ø
3,0 mm	Germany	REF 3390
3,0 mm	France	REF 3391
3,0 mm	Italy	REF 3392
3,0 mm	Spain	REF 3393
3,0 mm	Sweden	REF 3394
3,0 mm	Brazil	REF 3395
3,0 mm	Transylvania	REF 3396
3,0 mm	Atlantis	REF 3397
3,0 mm	White Dots	REF 3398
3,0 mm	Green Dots	REF 3399
3,0 mm	Multicolor-Set	REF 3400

CE

Ausführliche Herstelleranleitungen zu den jeweiligen Anwendungen finden Sie hier:

