




Reparaturanleitung BIOSTAR® 4-Aligner

3 Austausch Ventile, Druckregler

Austausch Ventile, Druckregler


- 1** TRENNEN SIE DAS GERÄT VOM STROMNETZ!

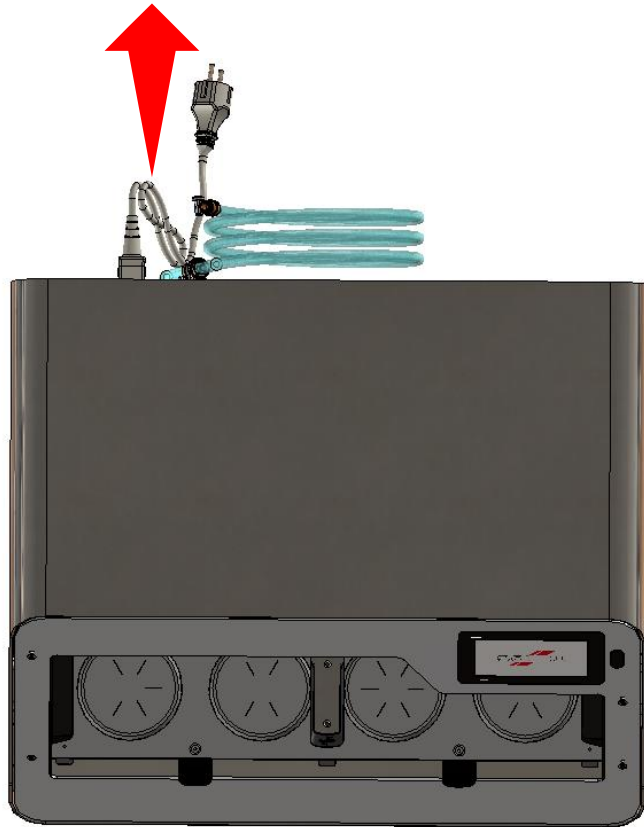

- 2** Drehen Sie das Gerät, so dass Sie an die Schrauben der beiden Seitenflächen gelangen.


Heben Sie dabei das Gerät NICHT an der FRONTBLENDE an, sondern greifen Sie unter das Gerät!!

Stellen Sie sicher, dass die aktuelle Software-Version installiert ist.

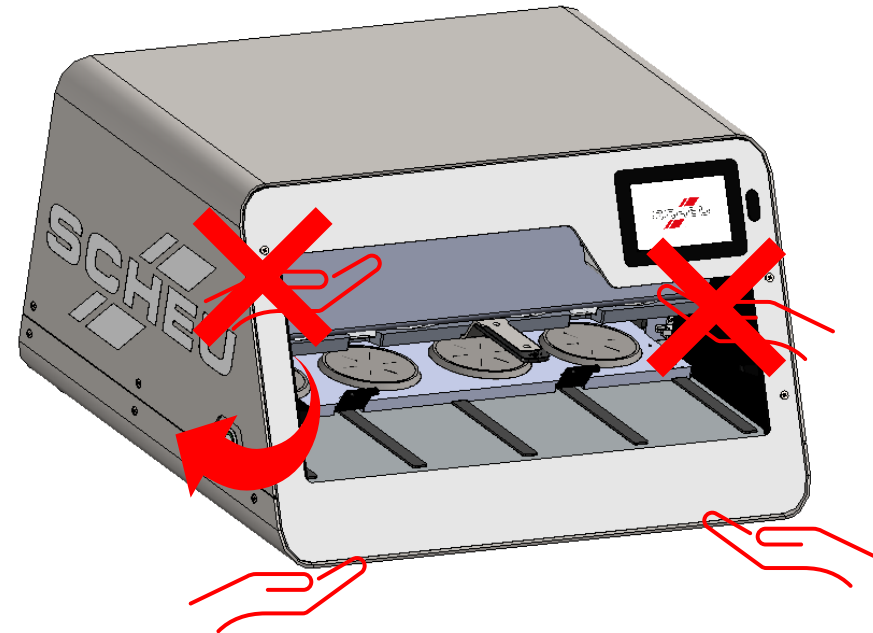


Austausch Ventile, Druckregler

- 3** Lösen Sie die 6 Schrauben des Gehäusebodens und stellen Sie das Gerät auf die Seite.

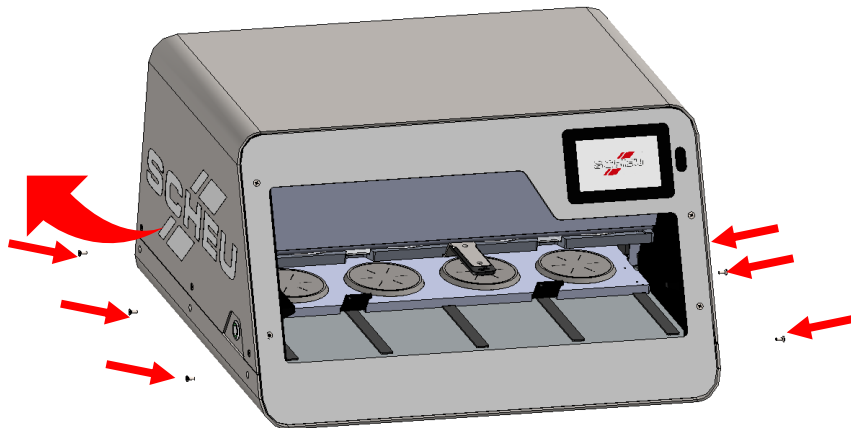


- 4** Schrauben Sie die 7 Gehäusefüße ab und lösen Sie den Gehäuseboden und legen alles zur Seite.

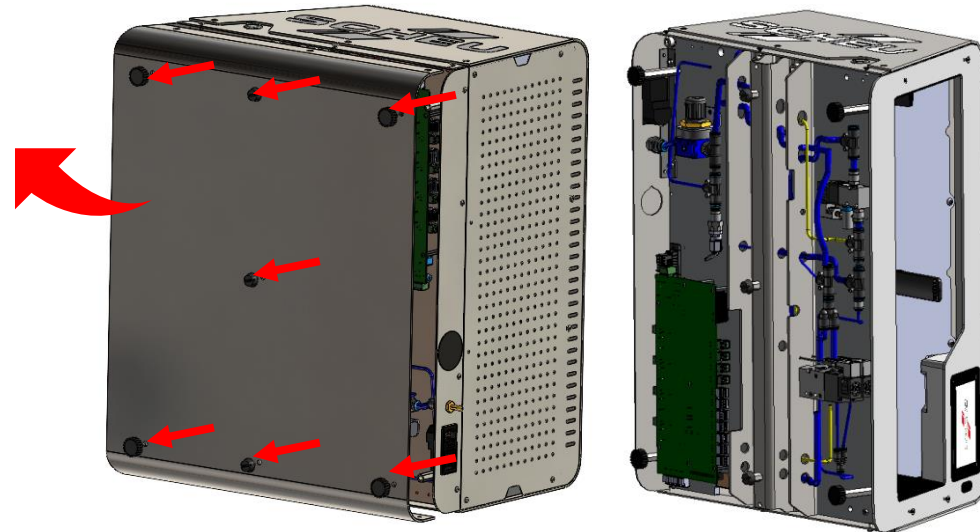


Austausch Ventile, Druckregler

5


Tauschen Sie entsprechende Ventile oder Pneumatikelemente aus (siehe Plan 3030.833_e FESTO – für alle Geräte bis SN 10097 gilt der Plan 3030_833).

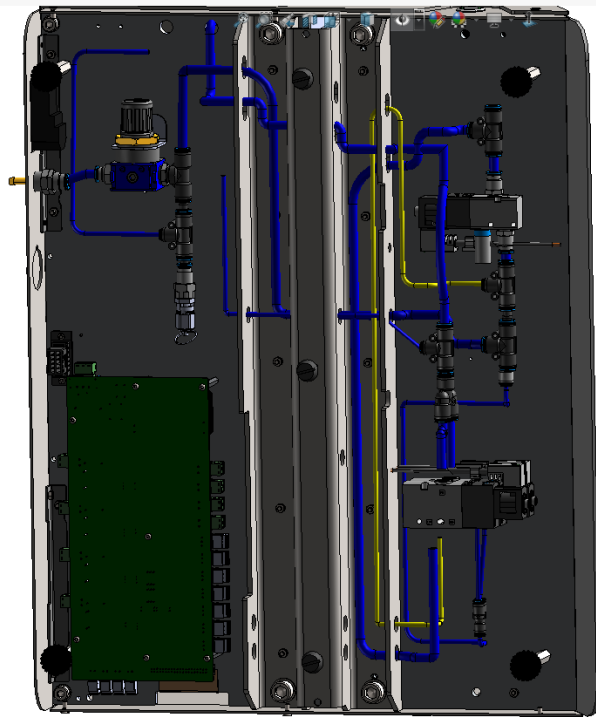**6**

Setzen Sie die Bodenplatte wieder auf und verschrauben die Bodenplatte mit den Seitenteilen und den Gehäusefüßen.

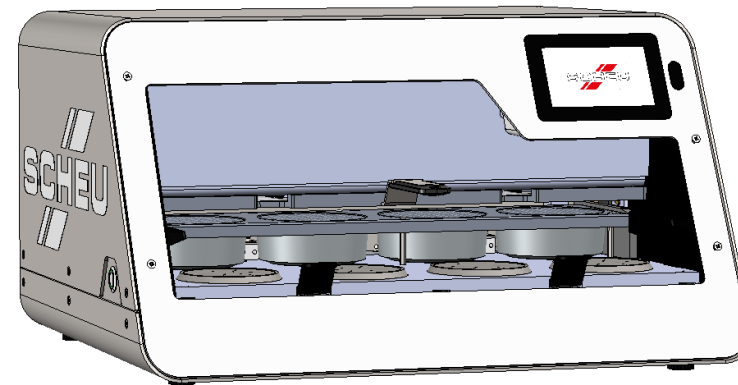

Austausch Ventile, Druckregler

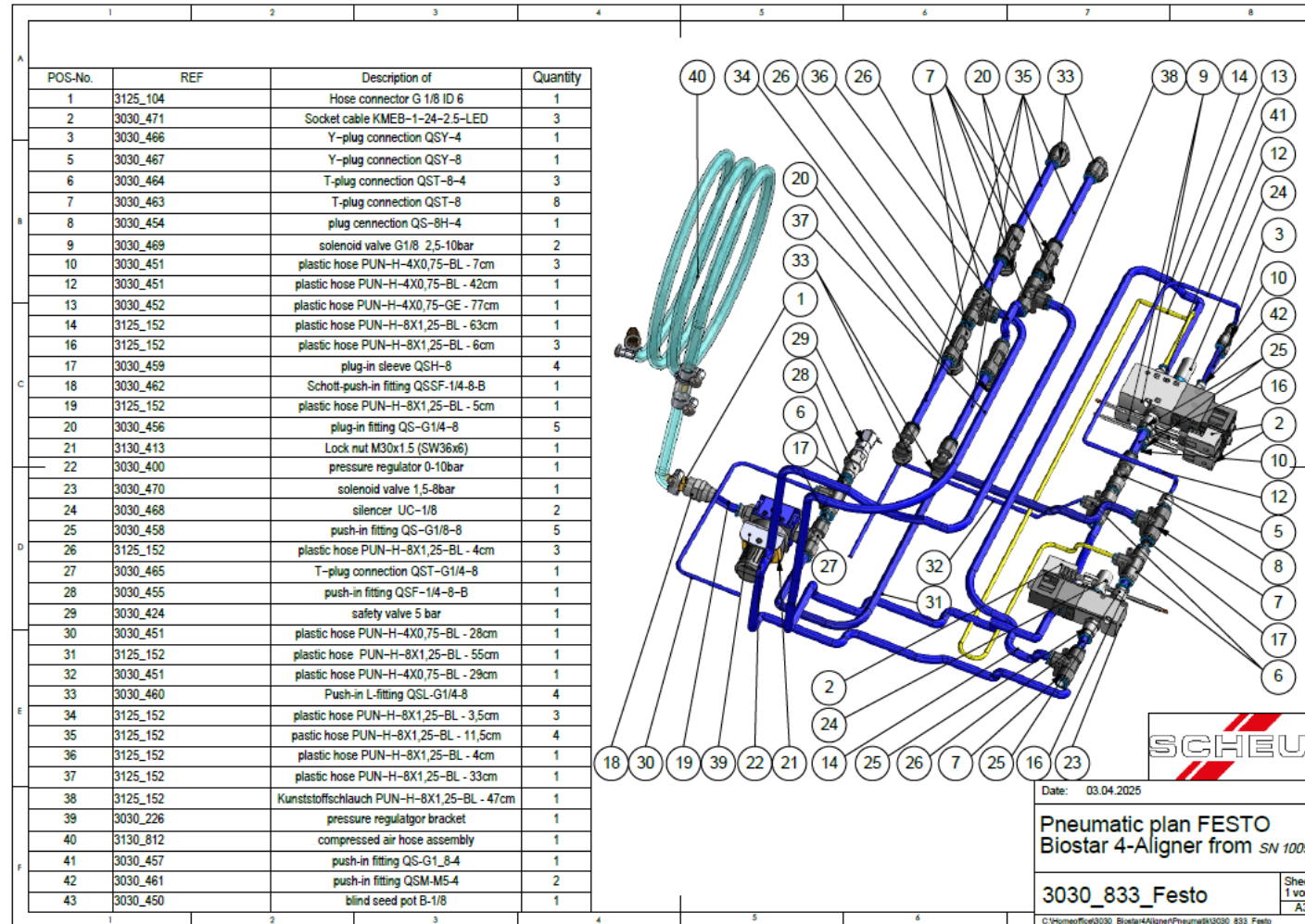

Auswechseln Ventile, Druckregler

