




Reparaturanleitung BIOSTAR® 4-Aligner

10 Austausch O-Ring 3030.507


Austausch O-Ring 3030.507

1 TRENNEN SIE DAS GERÄT VOM STROMNETZ!

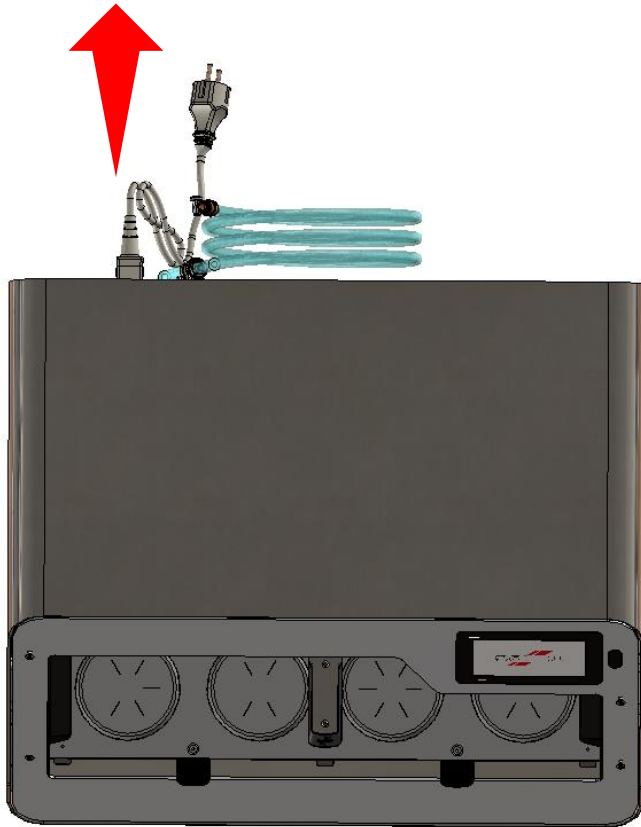

2 Wenn Sie das das Gerät bewegen oder drehen – Fassen Sie NICHT an die Frontblende sondern NUR unter das Gerät!

Stellen Sie sicher, dass die aktuelle Software-Version installiert ist.

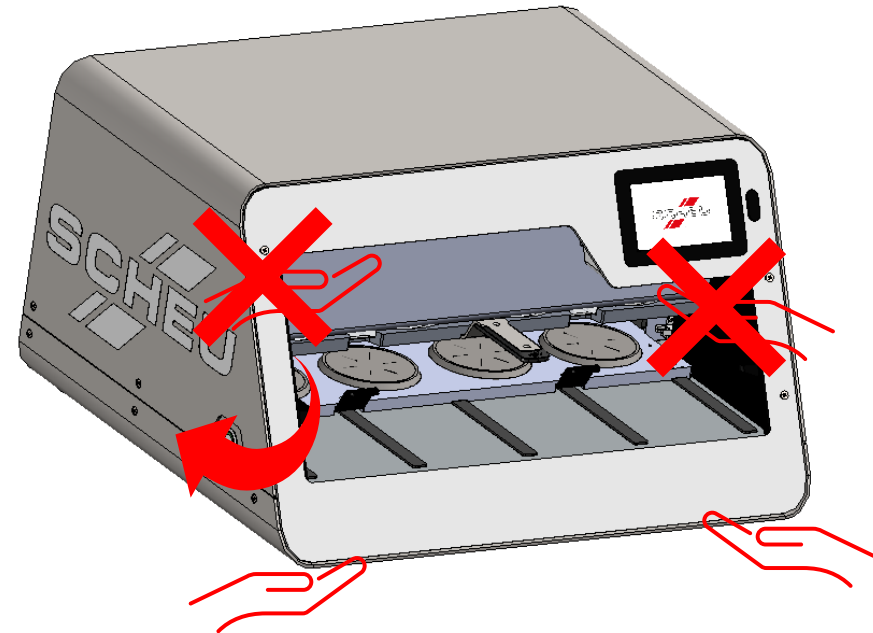

Austausch O-Ring 3030.507

3

Schieben Sie einen kleinen Schraubenzieher vorsichtig zwischen Druckkammer und O-Ring und heben Sie den O-Ring an, sodass Sie ihn heraus ziehen können. Reinigen Sie die O-Ring-Nut und fädeln einen neuen O-Ring ein. Dieser muss gleichmäßig in der Nut versinken.

