




# Reparaturanleitung BIOSTAR® 4-Aligner

11 Austausch EIN/AUS-Schalter  
3030.966 / 3030.912

# Austausch EIN/Ausschalter 3030.966


**1** TRENNEN SIE DAS GERÄT VOM STROMNETZ!

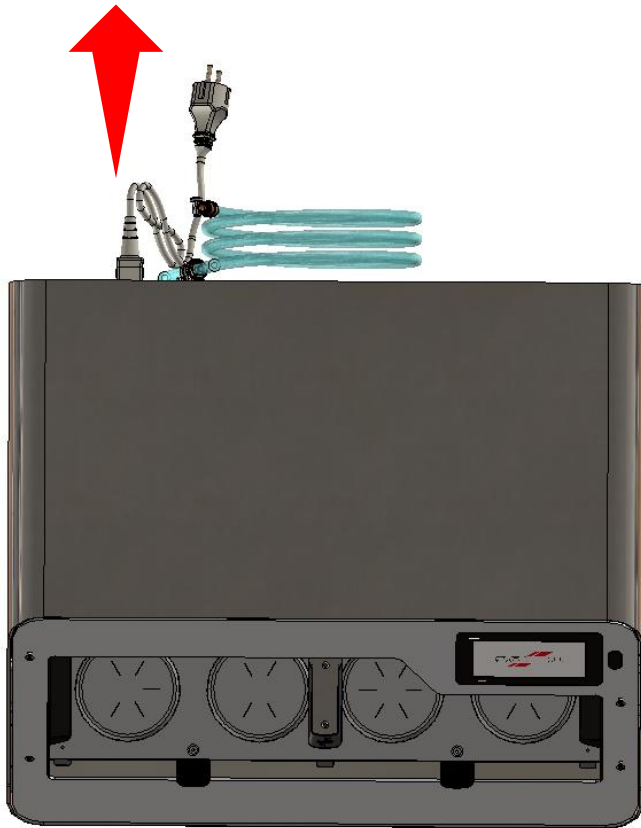

**2** Drehen Sie das Gerät, so dass Sie an die Schrauben der beiden Seitenflächen gelangen.

Heben Sie dabei das Gerät NICHT an der FRONTBLENDE an, sondern greifen Sie unter das Gerät!!



Stellen Sie sicher, dass die aktuelle Software-Version installiert ist.

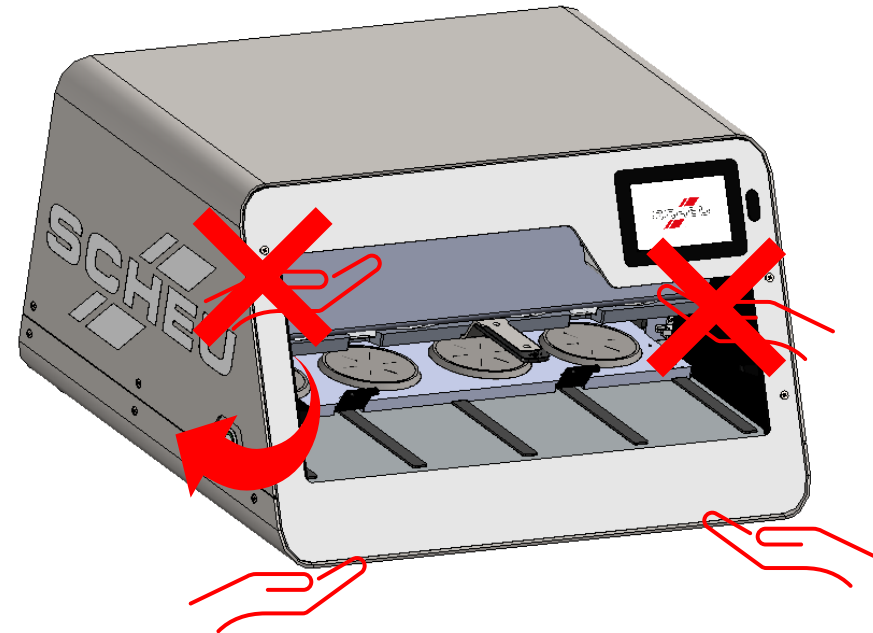

# Austausch EIN/Ausschalter 3030.966



**3**

Schieben Sie einen kleinen Schraubenzieher vorsichtig zwischen den Wippschalter und das Gehäuse des Netzsteckers. Hebeln Sie den Wippschalter vorsichtig heraus. Achten Sie darauf, dass sich die Kabelschuhe nicht lösen. Sollte der Wippschalter sich aus irgendeinem Grund NICHT lösen lassen, gehen Sie weiter zur Seite 5.

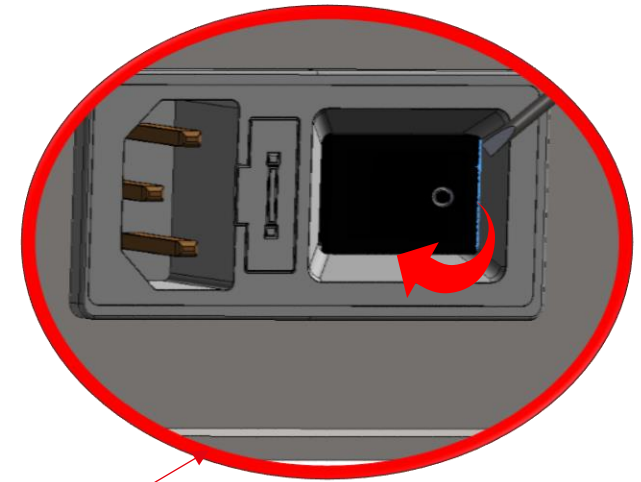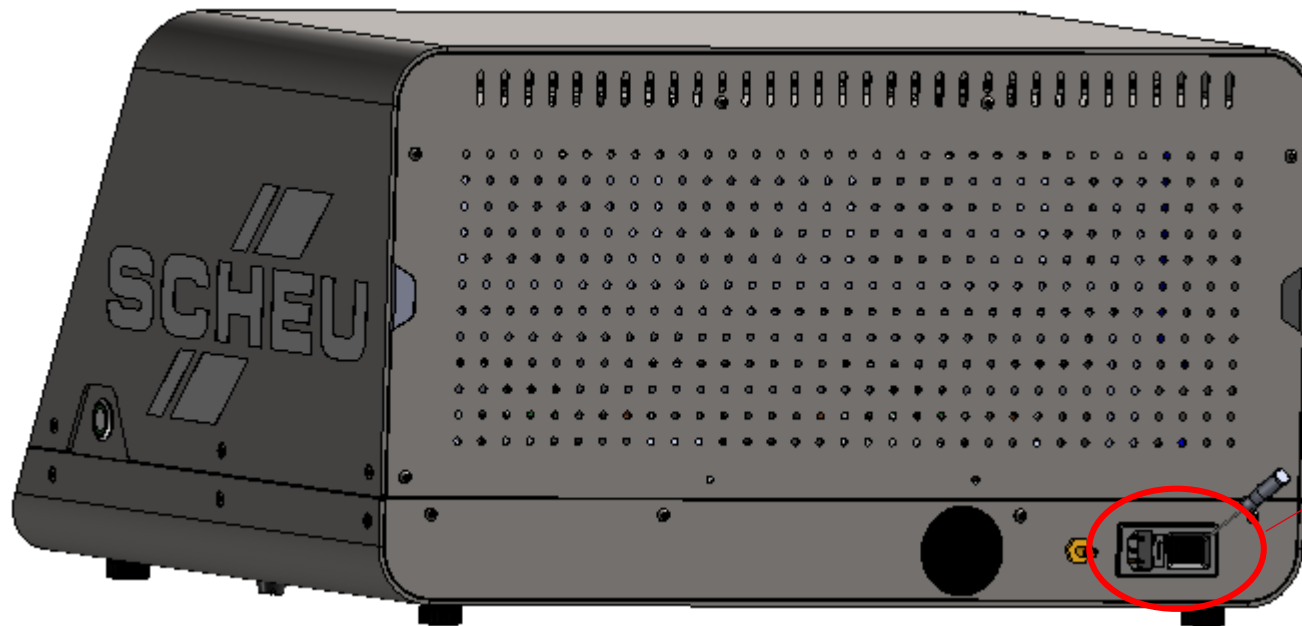

# Austausch EIN/Ausschalter 3030.966

- 4** Legen sie den älteren Stecker zur Seite und beachten Sie die Anordnung der Kabelschuhe.
- 5** Nehmen Sie den neuen Schalter. Stecken Sie die Kabelschuhe so auf die Kontakte, wie es abgebildet es bzw. wie es vorher war. Schieben Sie den Schalter gleichmäßig in den Netzstecker bis er einrastet. Die Markierung „I“ der Wippe muss nach außen gerichtet sein (siehe Abbildung).

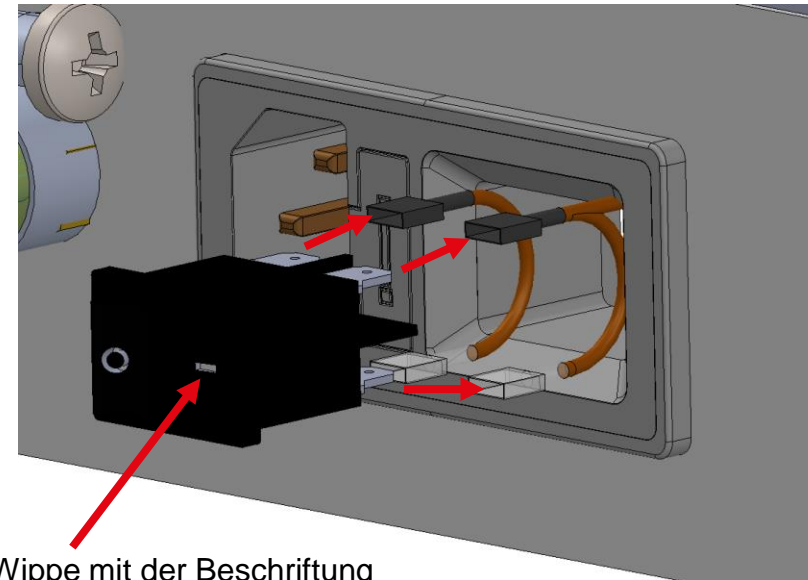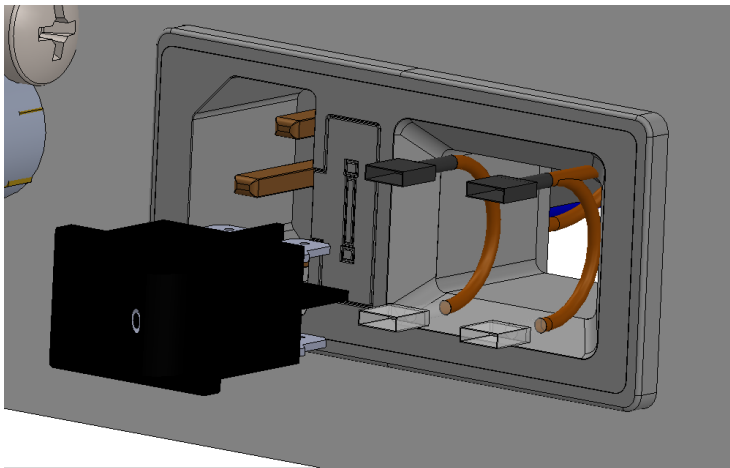

Wippe mit der Beschriftung „I“ in diese Richtung zeigend


# Austausch EIN/Ausschalter 3030.966

AUSTAUSCH GERÄTESTECKER KOMPLETT!! 3030.912

6


*ACHTUNG! Die nächsten Schritte sind nur notwendig, wenn sich der alte Wippschalter nicht lösen lässt!!!*

Lösen Sie die 6 Schrauben des Gehäusebodens und stellen Sie das Gerät auf die Seite.

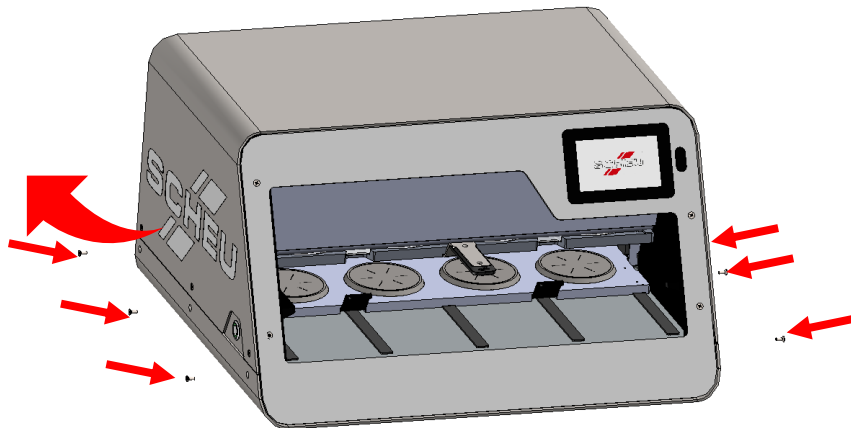

7

Schrauben Sie die 7 Gehäusefüße ab und lösen Sie den Gehäuseboden und legen alles zur Seite.

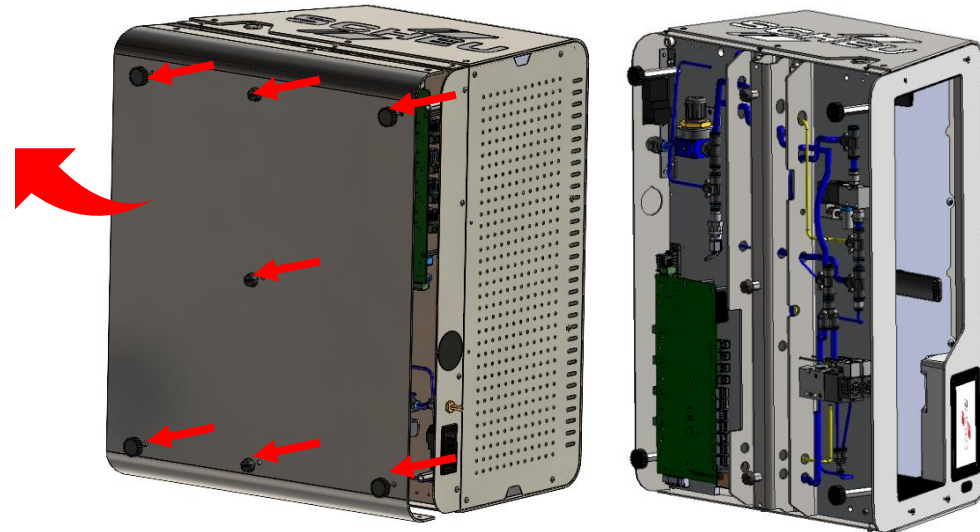


# Austausch EIN/Ausschalter 3030.966

## AUSTAUSCH GERÄTESTECKER KOMPLETT!! 3030.912


8

Positionieren Sie das Gerät so, dass von hinten an den Gerätestecker gelangen. Ziehen Sie die Kabelschuhe ab, und drücken Sie den Stecker langsam und gleichmäßig von innen nach außen. Ggfls. drücken Sie dabei die seitlichen Nasen zusammen.

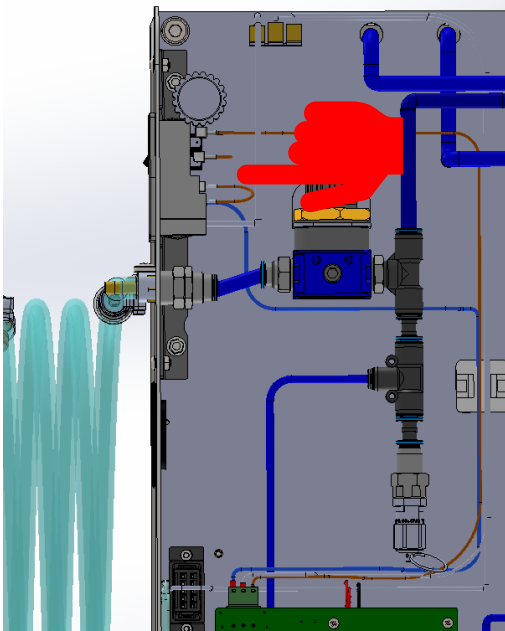

9


Schieben Sie den Wippschalter mit der Markierung „I“ zum Rand hin zeigend in den Gerätestecker gleichmäßig bis er einrastet.

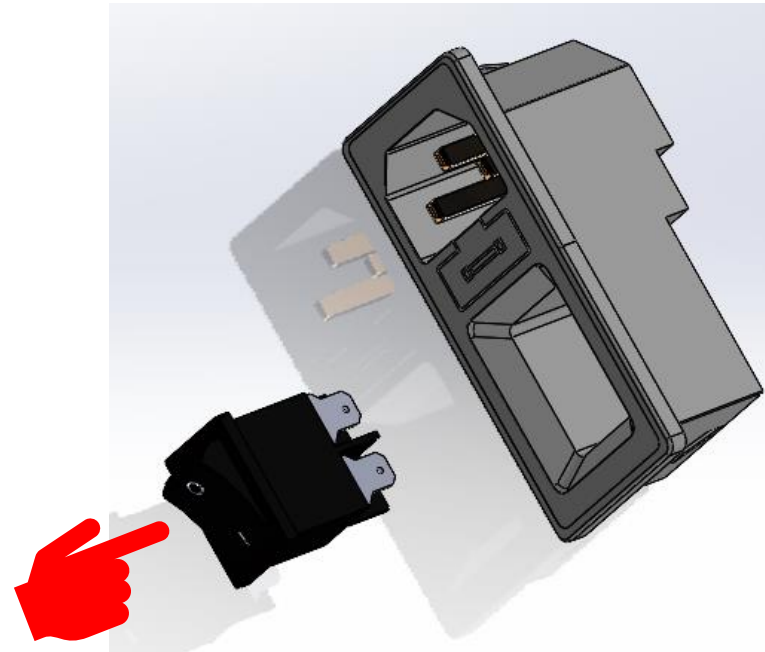



# Austausch EIN/Ausschalter 3030.966

AUSTAUSCH GERÄTESTECKER KOMPLETT!! 3030.912

- 10** Schieben Sie nun den kompletten Gerätestecker in die Ausnehmung des BIOSTAR 4-Aligners gleichmäßig, bis er eingerastet ist.

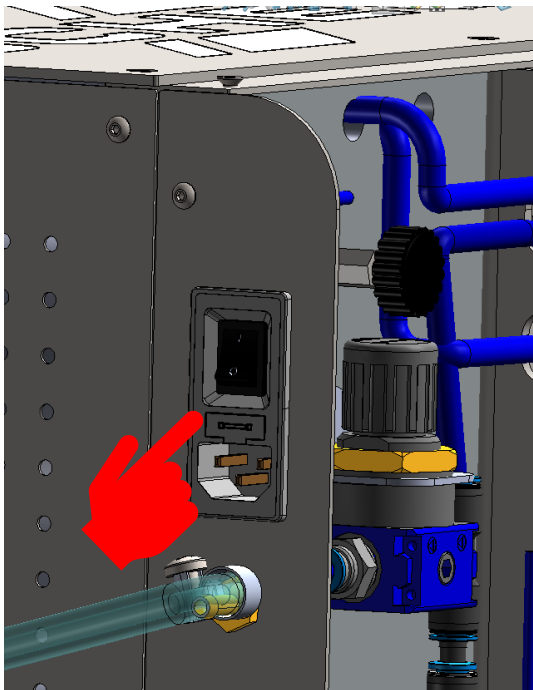

- 11** Schieben Sie die die Kabelschuhe entsprechend der Vorlage auf die Kontakte des Gerätesteckers und Wippschalters.

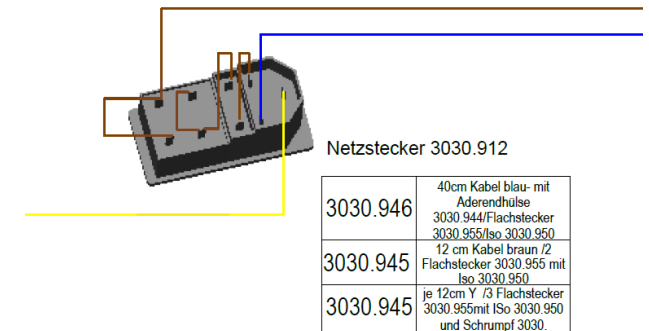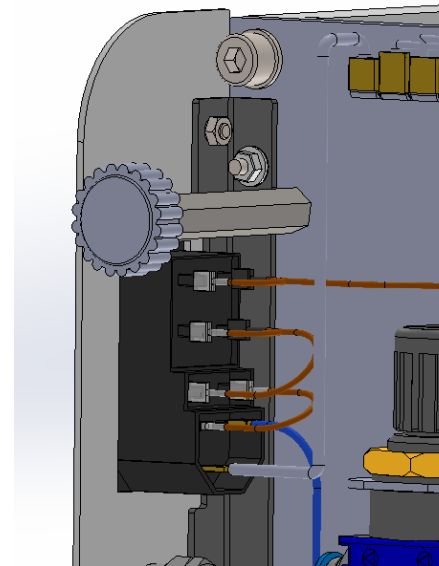

# Austausch EIN/Ausschalter 3030.966

AUSTAUSCH GERÄTESTECKER KOMPLETT!! 3030.912

- 12** Setzen Sie die Bodenplatte wieder auf und verschrauben die Bodenplatte mit den Seitenteilen und den Gehäusefüßen.

